

Monofocal  
Bifocal  
Trifocal  
**Q** progresiv

**Ne însoțiți către viitor ?**

**Vedere funțională -  
aproape și la distanță**



First Quality  
in Ophthalmology

Distribuitor exclusiv




Brasov, Str. De Mijloc, nr. 173  
Tel./Fax: 0268 415927  
info@kemblimed.ro



First Quality  
in Ophthalmology


# Întodeauna exista loc de progres !

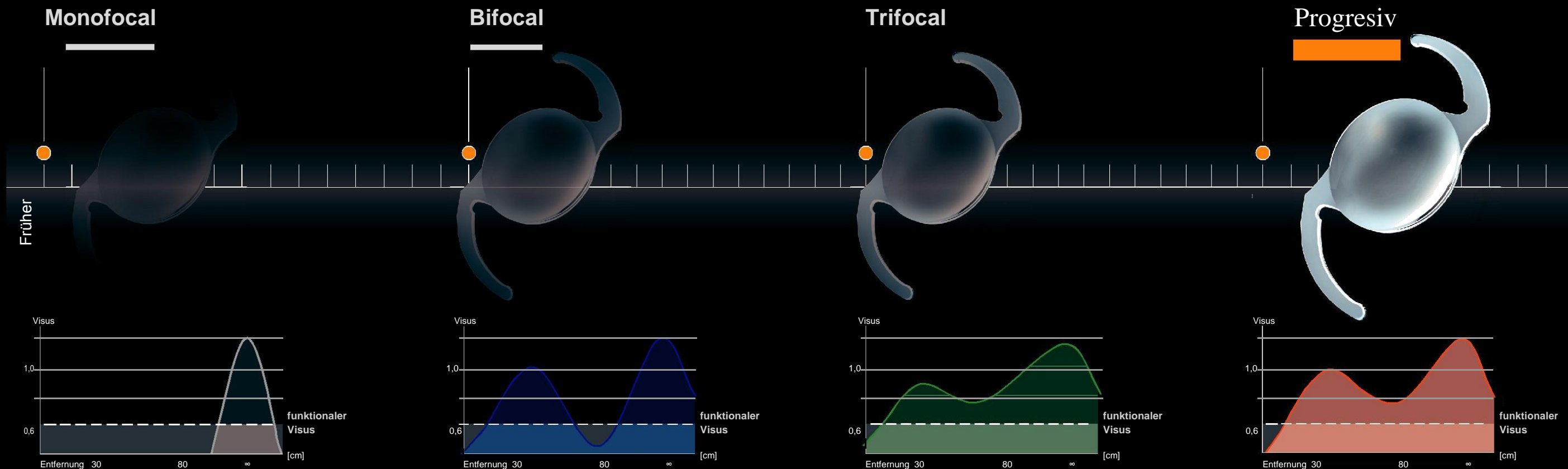

**Vedere funcțională –  
Aproape și la distanță**

## Comparație Trifocal – Q Progresiv


### Trifocal

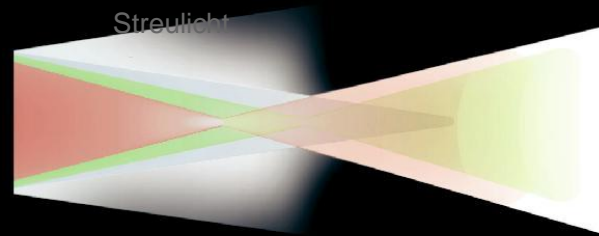

Ordnung	Array 1	Array 2
0. Ordnung	∞	∞
1. Ordnung	+ 3,5 dpt**	+ 1,75 dpt*
2. Ordnung	+ 7,0 dpt	+ 3,5 dpt**
Streulicht	ca. 14 %	ca. 18 %

\* Intermediär \*\* Nähe

### Q Progresiv

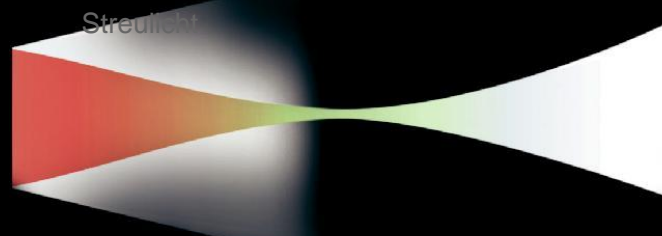

Ordnung	Array
0. Ordnung	∞
1. Ordnung	+ 3,5 dpt**
2. Ordnung	+ 7,0 dpt
Streulicht	ca. 18 %

\*\* Nähe

## Concluzii în urma utilizării

*„Comparație între Lentila intraoculara trifocala (Micro F) și a celei progresivei (BIEWYN), conform observațiilor ulterioare implantării.“*

# Comparație Trifocal – Q Progresiv

## Pacienți și parametrii

Lentilă intraoculară	B1EWYN	Micro F
Ochi	26	44
Vârstă	73 ± 6	70 ± 7
Chirurg	3	3
Interval	> 2 sapt. post-op	2 luni post-op

## Parametrii:

SEQ

Vederesc (Depărtare, Aproape, Intermediar<sub>cm, 80 cm</sub>)

Vederecc (Depărtare, Aproape,

Intermediar<sub>cm, 80 cm</sub>)

Defokuskurve

